

BOHRPROTOKOLL 2.0

ICX-3.3 IMPLANTAT

BL & TL PREMIUM & ACTIVE MASTER



BE SMART. BE ICX.



*... DIE KRAFT,
VISIONEN ZU REALITÄTEN ZU ERKLÄREN.*



ICX-SHOP!



**MEINE PRAXIS.
MEIN SYSTEM.**



Inhalt

Seite

ICX-3.3 Bonelevel (BL) & Tissuelevel (TL)-Implantate & Chirurgie-Boxen	4-7
--	-----

ICX-PREMIUM 3.3 BL & TL IMPLANTATE – BOHRPROTOKOLL	8
---	----------

Chirurgische Vorgehensweise **ICX-PREMIUM**

BL & TL IMPLANTATE Ø 3,3mm	9-12
---	-------------

ICX-ACTIVE MASTER 3.3 BL & TL IMPLANTATE – BOHRPROTOKOLL	14
---	-----------

Chirurgische Vorgehensweise **ICX-ACTIVE MASTER**

BL & TL IMPLANTATE Ø 3,3mm	15-18
---	--------------

ICX-3.3 IMPLANTAT

BL & TL PREMIUM & ACTIVE MASTER

DIGITAL. DENTAL. FINAL.


medentis
medical

ICX-3.3 IMPLANTAT


BL & TL PREMIUM & ACTIVE MASTER

In Bereichen mit geringem Platzangebot bieten schmale Zahnimplantate eindeutige Vorteile.

Dies liegt an der Entwicklung innovativer Implantattypen mit einem reduzierten Durchmesser, die es erlauben, Mindestkriterien für eine fachgerechte Indikation einzuhalten.

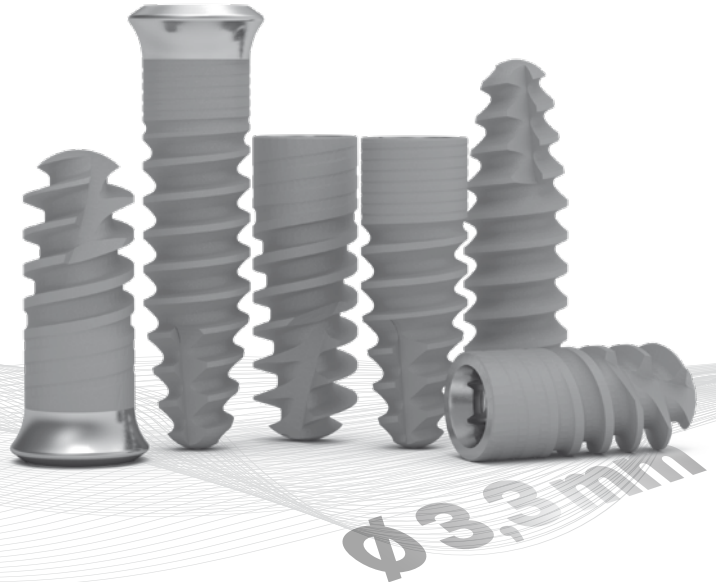


HERAUSRAGENDE EIGENSCHAFTEN DER ICX-Ø 3,3MM IMPLANTATE

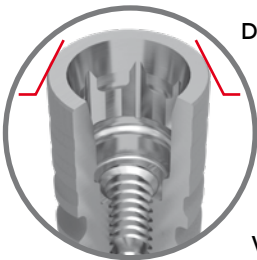


Das ICX-PREMIUM- Ø 3,3mm und das ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3mm Implantat eröffnet völlig neue Horizonte im Bereich der durchmesserreduzierten Implantation!

Wir erweitern unsere ICX-Familie mit einem durchmesserreduzierten Implantat.

Dadurch können zusätzliche Indikationen in der gewohnten hohen Qualität und Präzision der ICX-typischen Implantat-Abutment-Verbindung abgedeckt werden. Um dies gewährleisten zu können, haben wir diese für den schmalen Durchmesser neu durchdacht und eine völlig neue Prothetiklinie aufgelegt.

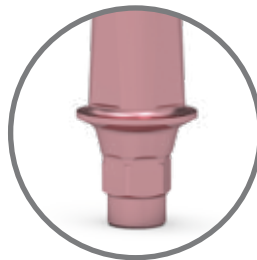

Unser Ziel war es, Ihnen als Behandler ein Implantat an die Hand zu geben, welches in Grenzbereichen genutzt werden kann, ohne Kompromisse in Bezug auf die Stabilität eingehen zu müssen.

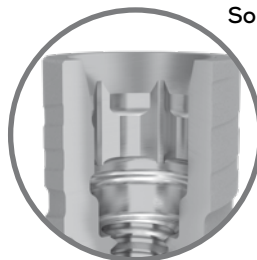

So können Sie nun auch schwierige Fälle einfacher lösen und sich auf unsere ICX-PREMIUM Ø 3,3mm und die ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3mm Implantate verlassen!

WICHTIGER HINWEIS:

Die ICX-PREMIUM Ø 3,3mm sowie die ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3mm Implantate können **NICHT mit der ICX-Standard-Prothetik versorgt** werden!

Die ICX-Ø 3,3mm Implantate haben aufgrund der unterschiedlichen Innengeometrie zu den ICX-PREMIUM & ICX-ACTIVE-MASTER rot, Ø 3,75mm · grün, Ø 4,1mm · blau, Ø 4,8mm Implantaten eine eigene Prothetik-Linie. (Systemfarbe rosa)!



ICX-BL & TL Ø 3,3mm Implantate

ICX-PREMIUM Ø 3,3mm Implantate (BL)


Alle ICX-PREMIUM Ø 3,3mm Implantate zu 79,- € sind nur im 6er-Pack erhältlich

Stück: € 79,-*/6er-Pack: € 474,-*

Artikel-Nr.

C-001-330080	ICX-PREMIUM Ø 3,3 · L 8mm (6er-Pack)
C-001-330100	ICX-PREMIUM Ø 3,3 · L 10mm (6er-Pack)
C-001-330125	ICX-PREMIUM Ø 3,3 · L 12,5mm (6er-Pack)

Ø 3,3mm

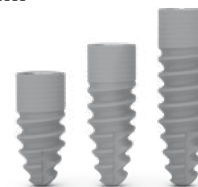

ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3mm Implantate (BL)


Alle ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3mm Implantate zu 79,- € sind nur im 6er-Pack erhältlich

Stück: € 79,-*/6er-Pack: € 474,-*

Artikel-Nr.

ACM-001-330080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3 · L 8mm (6er-Pack)
ACM-001-330100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3 · L 10mm (6er-Pack)
ACM-001-330125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3 · L 12,5mm (6er-Pack)

Ø 3,3mm

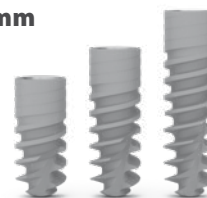

ICX-PREMIUM Ø 3,3mm Implantate (TL)


Alle ICX-PREMIUM Ø 3,3mm Implantate zu 79,- € sind nur im 6er-Pack erhältlich

Stück: € 79,-*/6er-Pack: € 474,-*

Artikel-Nr.

T-001-330080	ICX-PREMIUM TissueLine Implantat Ø 3,3 x 8mm (6er-Pack)
T-001-330100	ICX-PREMIUM TissueLine Implantat Ø 3,3 x 10mm (6er-Pack)
T-001-330125	ICX-PREMIUM TissueLine Implantat Ø 3,3 x 12,5mm (6er-Pack)

Ø 3,3mm

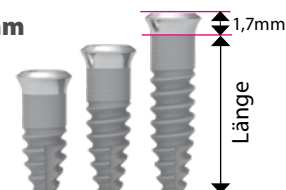

ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3mm Implantate (TL)


Alle ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3mm Implantate zu 79,- € sind nur im 6er-Pack erhältlich

Stück: € 79,-*/6er-Pack: € 474,-*

Artikel-Nr.

TAM-001-330080	ICX-ACTIVE MASTER TissueLine Implantat Ø 3,3 x 8mm (6er-Pack)
TAM-001-330100	ICX-ACTIVE MASTER TissueLine Implantat Ø 3,3 x 10mm (6er-Pack)
TAM-001-330125	ICX-ACTIVE MASTER TissueLine Implantat Ø 3,3 x 12,5mm (6er-Pack)

Ø 3,3mm

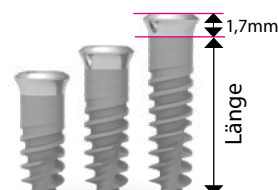

*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.09.22). * Alle Preise zzgl. MwSt. ICX-Implantate zu 79,- € nur im 6er-Pack.

ICX-PREMIUM Ø 3,3mm Bohrer

Artikel-Nr.	ICX-PREMIUM 3.3 Bohrer	Artikel	Preis €
C-014-003330		ICX-PREMIUM 3.3 Parallelbohrer weich Ø 3.3 rosa I ●	19,90*
C-014-006330		ICX-PREMIUM 3.3 Parallelbohrer Standard Ø 3.3 rosa II ●	19,90*
C-014-007330		ICX-PREMIUM 3.3 Parallelbohrer hart Ø 3.3 rosa III ●	19,90*
C-014-005330		ICX-PREMIUM 3.3 Stopbohrer Ø 3.3 rosa ●	19,90*

ICX-PREMIUM Chirurgie-Box

gefüllt: e 990,-*

Artikel-Nr.	ICX-PREMIUM Chirurgie-Box (gefüllt)	Preis €
C-018-010003	ICX-PREMIUM Chirurgie-Box (gefüllt) 	990,-*

ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3mm Bohrer


Artikel-Nr.	ICX-ACTIVE-MASTER 3.3 Bohrer	Artikel	Preis €
ACM-014-003330		ICX-ACTIVE-MASTER 3.3 Parallelbohrer weich Ø 3.3 rosa I ●	39,-*
ACM-014-006330		ICX-ACTIVE-MASTER 3.3 Parallelbohrer Standard Ø 3.3 rosa II ●	39,-*
ACM-014-007330		ICX-ACTIVE-MASTER 3.3 Parallelbohrer hart Ø 3.3 rosa III ●	39,-*
ACM-014-005330		ICX-ACTIVE-MASTER 3.3 Stopbohrer Ø 3.3 rosa ●	39,-*

ICX-ACTIVE-MASTER Chirurgie-Box

gefüllt: e 990,-*

Artikel-Nr.	ICX-ACTIVE-MASTER Chirurgie-Box (gefüllt)	Preis €
C-018-000006	ICX-ACTIVE-MASTER Chirurgie-Box (gefüllt) 	990,-*


ACHTUNG! **WICHTIGER HINWEIS** ACHTUNG!

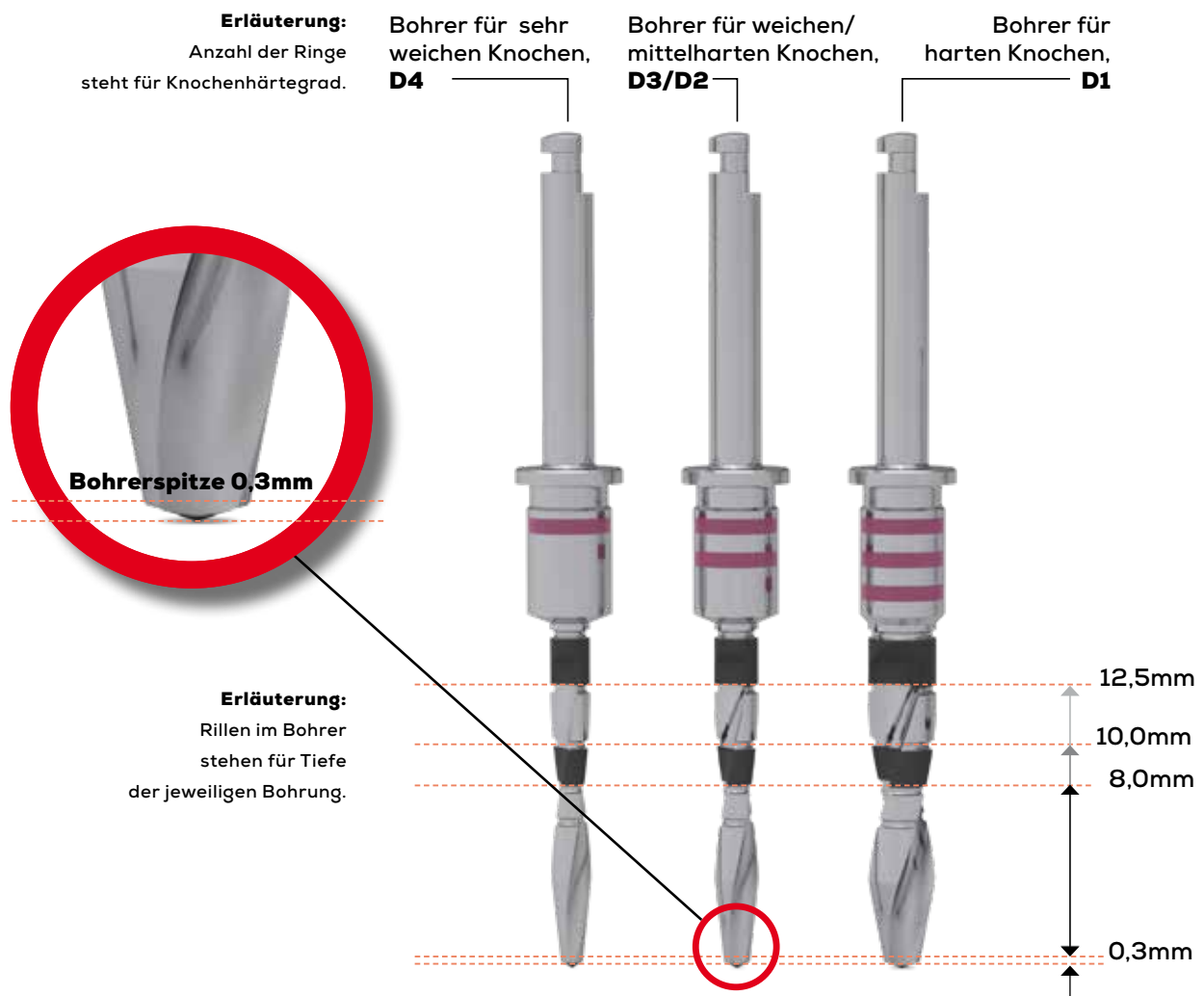

Bei den ICX-Ø3,3mm Bohrern ist die Bohrlänge aufgrund der Bohrspitze um 0,3mm länger – Es muss sichergestellt sein, dass diese zusätzliche Länge zulässig ist, wenn im Bereich wichtiger anatomischer Strukturen gearbeitet wird.

ICX

DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

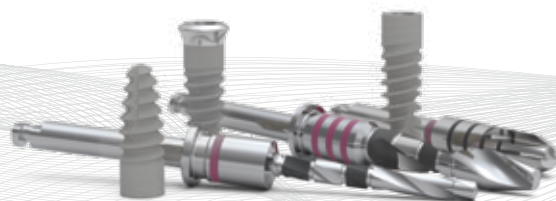

KURZÜBERSICHT- BOHRPROTOKOLL 2.0

für ICX-PREMIUM 3.3

BL & TL Ø 3,3mm Implantate

WEICHER KNOCHEN

Step	Bezeichnung	Artikelnummer
1	Cortical Bohrer Vorbohrer	FIL-186RF
2	ICX-PREMIUM 3.3 Parallelbohrer weich I	C-014-03330
3	ICX-PREMIUM 3.3 Stopbohrer	C-014-005330

MITTELHARTER KNOCHEN

Step	Bezeichnung	Artikelnummer
1	Cortical Bohrer Vorbohrer	FIL-186RF
2	ICX-PREMIUM 3.3 Parallelbohrer Standard II	C-014-006330
3	ICX-PREMIUM 3.3 Stopbohrer	C-014-005330

HARTER KNOCHEN

Step	Bezeichnung	Artikelnummer
1	Cortical Bohrer Vorbohrer	FIL-186RF
2	ICX-PREMIUM 3.3 Parallelbohrer Standard II	C-014-006330
3	ICX-PREMIUM 3.3 Parallelbohrer Hart III	C-014-007330
4	ICX-PREMIUM 3.3 Stopbohrer	C-014-005330


ICX-3.3 IMPLANTAT PREMIUM



ICX-PREMIUM

BL & TL Ø 3,3mm Implantate


BOHRPROTOKOLL 2.0
für ICX-PREMIUM
BONELEVEL (BL) &
TISSUE LINE (TL)

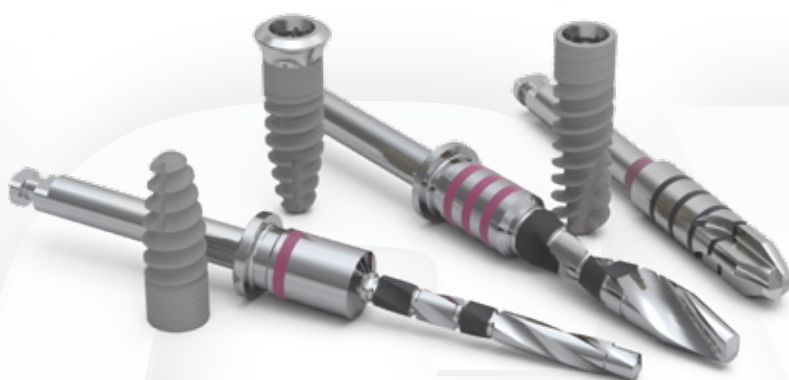

ICX-PREMIUM

ICX-PREMIUM BL & TL Ø 3,3mm Implantate

Chirurgische Vorgehensweise **ICX-PREMIUM** BL & TL Ø 3,3mm

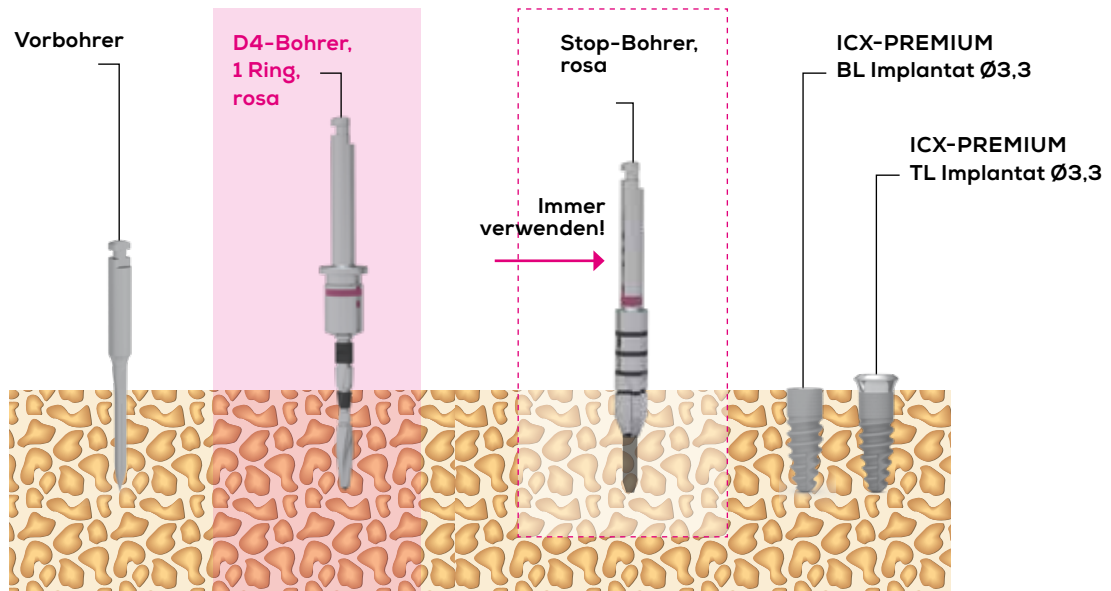

ICX-PREMIUM STANDARDIMPLANTATION

BOHRERPROTOKOLL FÜR SEHR WEICHEN KNOCHEN

Bitte hier nur Bohrer mit 1 Farbring verwenden!




Wichtiger Hinweis: Bohrer für sehr weichen Knochen D4, erkennen Sie an der Farbmarkierung = **1 rosa Ring**



ICX-PREMIUM BL & TL Ø 3,3mm Implantate

Chirurgische Vorgehensweise **ICX-PREMIUM** BL & TL Ø 3,3mm

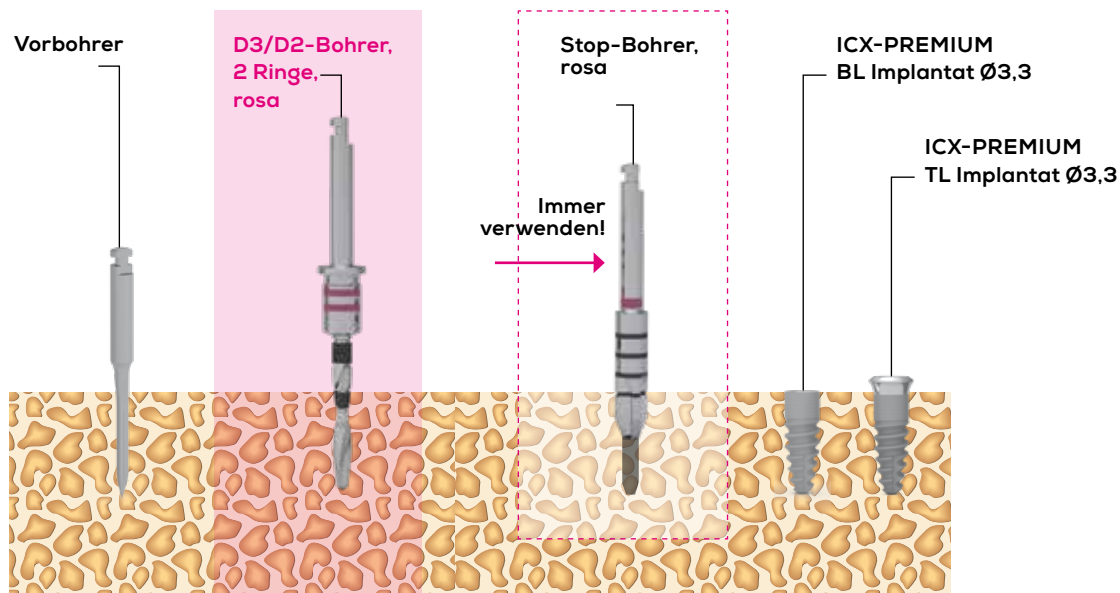

ICX-PREMIUM STANDARDIMPLANTATION

BOHRERPROTOKOLL FÜR WEICHEN/MITTELHARTEN KNOCHEN

Bitte hier nur Bohrer mit 2 Farbringen verwenden!




Wichtiger Hinweis: Bohrer für weichen/mittelharten Knochen, D3/D2 erkennen Sie an der Farbmarkierung = 2 rosa Ringe



ICX-PREMIUM BL & TL Ø 3,3mm Implantate

Chirurgische Vorgehensweise **ICX-PREMIUM** BL & TL Ø 3,3mm

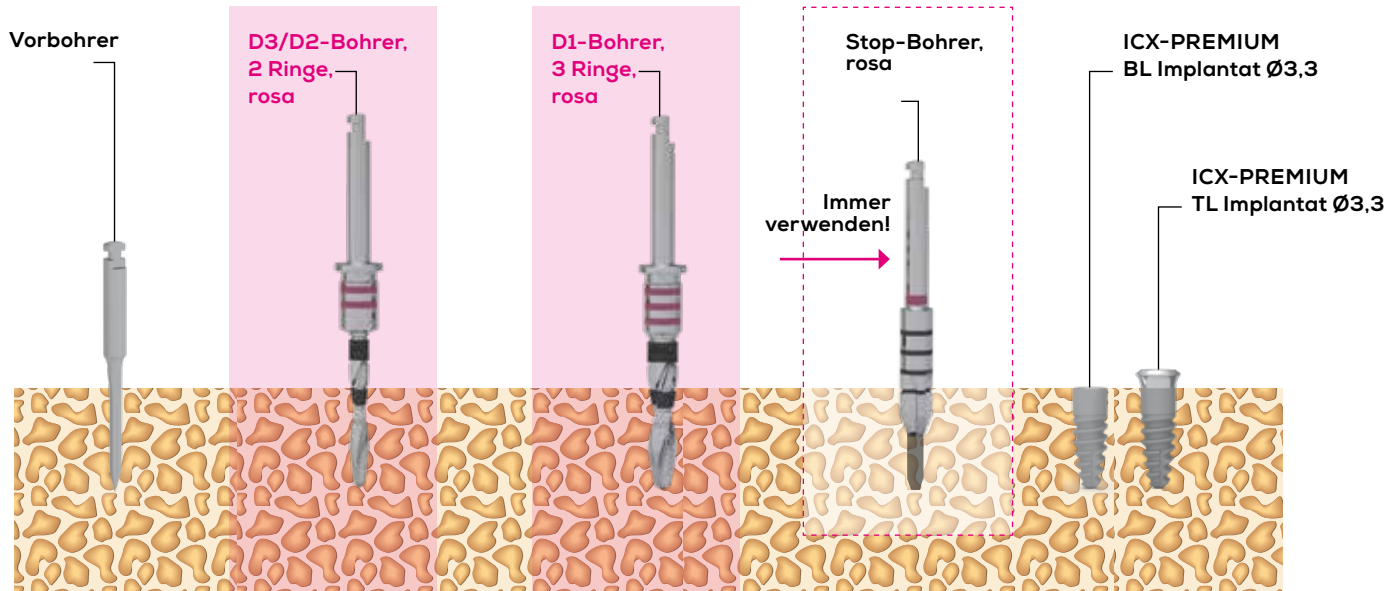

ICX-PREMIUM STANDARDIMPLANTATION

BOHRERPROTOKOLL FÜR HARTEN KNOCHEN

Bitte hier nur Bohrer mit 3 Farbringen verwenden!




Wichtiger Hinweis: Bohrer für harten Knochen D1, erkennen Sie an der Farbmarkierung = **3 rosa Ringe**



ICX-3.3 IMPLANTAT

BL & TL PREMIUM & ACTIVE MASTER

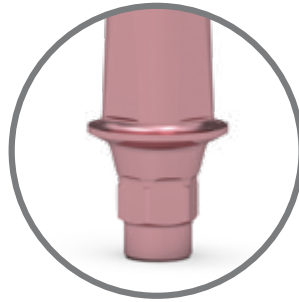

STARK & VORHERSAGBAR!



**BE SMART.
BE ICX.**

KURZÜBERSICHT- BOHRPROTOKOLL 2.0

für ICX-ACTIVE MASTER

BL & TL Ø 3,3mm Implantate

WEICHER KNOCHEN

Step	Bezeichnung	Artikelnummer
1	Cortical Bohrer Vorbohrer	FIL-186RF
2	ICX-ACTIVE 3.3 Parallelbohrer weich I	ACM-014-003330
3	ICX-ACTIVE 3.3 Stopbohrer	ACM-014-005330

MITTELHARTER KNOCHEN

Step	Bezeichnung	Artikelnummer
1	Cortical Bohrer Vorbohrer	FIL-186RF
2	ICX-ACTIVE 3.3 Parallelbohrer Standard II	ACM-014-006330
3	ICX-ACTIVE 3.3 Stopbohrer	ACM-014-005330

HARTER KNOCHEN

Step	Bezeichnung	Artikelnummer
1	Cortical Bohrer Vorbohrer	FIL-186RF
2	ICX-ACTIVE 3.3 Parallelbohrer Standard II	ACM-014-006330
3	ICX-ACTIVE 3.3 Parallelbohrer Hart III	ACM-014-007330
4	ICX-ACTIVE 3.3 Stopbohrer	ACM-014-005330

ICX-3.3 IMPLANTAT


ACTIVE MASTER



ICX-ACTIVE MASTER

BL & TL Ø 3,3mm Implantate


BOHRPROTOKOLL 2.0
für ICX-ACTIVE MASTER
BONELEVEL (BL) &
TISSUE LINE (TL)

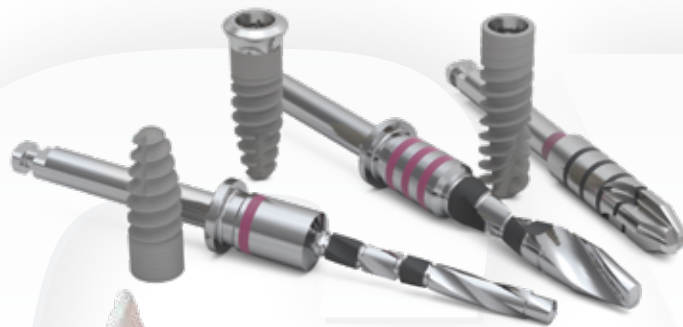

ICX-ACTIVE MASTER

ICX-ACTIVE MASTER BL & TL Ø 3,3mm Implantate

Chirurgische Vorgehensweise **ICX-ACTIVE MASTER** BL & TL Ø 3,3mm

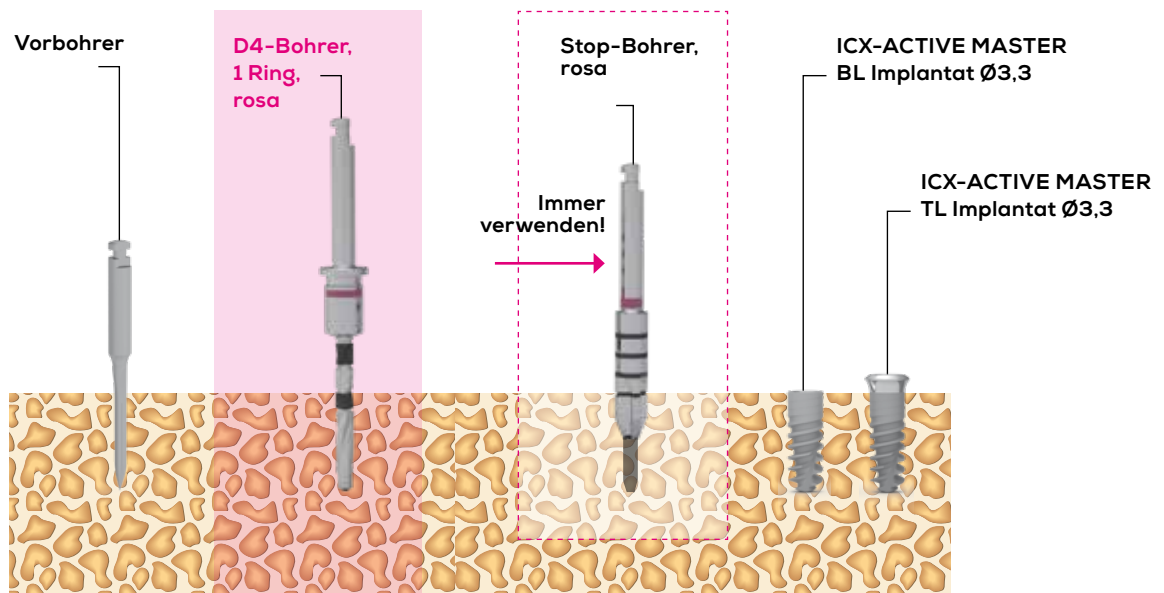

ICX-ACTIVE MASTER STANDARDIMPLANTATION

BOHRERPROTOKOLL FÜR SEHR WEICHEN KNOCHEN

Bitte hier nur Bohrer mit 1 Farbring verwenden!




Wichtiger Hinweis: Bohrer für sehr weichen Knochen D4, erkennen Sie an der Farbmarkierung = **1 rosa Ring**



ICX-ACTIVE MASTER BL & TL Ø 3,3mm Implantate

Chirurgische Vorgehensweise **ICX-ACTIVE MASTER** BL & TL Ø 3,3mm

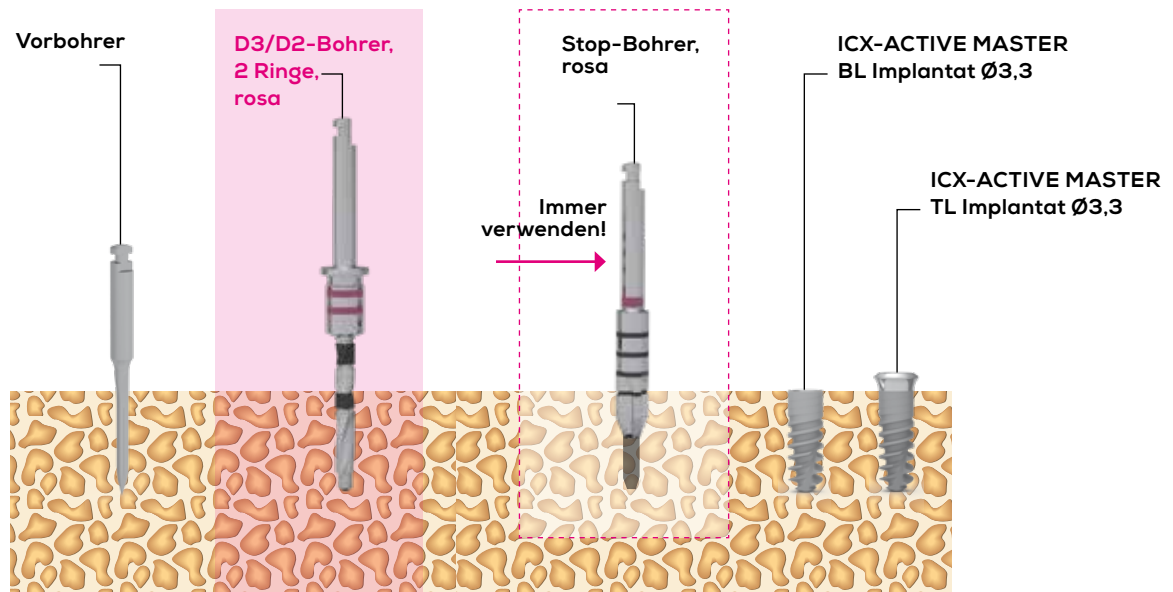

ICX-ACTIVE MASTER STANDARDIMPLANTATION

BOHRERPROTOKOLL FÜR WEICHEN/MITTELHARTEN KNOCHEN

Bitte hier nur Bohrer mit 2 Farbringen verwenden!




Wichtiger Hinweis: Bohrer für weichen/mittelharten Knochen, D3/D2 erkennen Sie an der Farbmarkierung = **2 rosa Ringe**



ICX-ACTIVE MASTER BL & TL Ø 3,3mm Implantate

Chirurgische Vorgehensweise **ICX-ACTIVE MASTER** BL & TL Ø 3,3mm

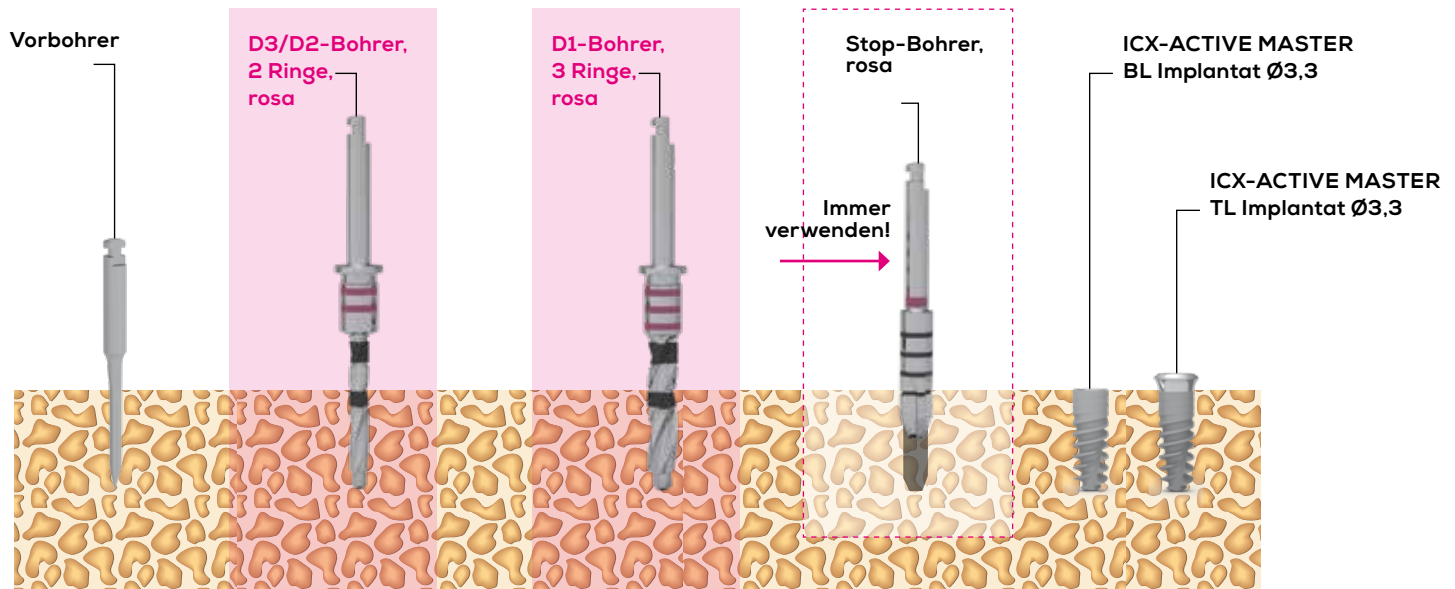

ICX-ACTIVE MASTER STANDARDIMPLANTATION

BOHRERPROTOKOLL FÜR HARTEN KNOCHEN

Bitte hier nur Bohrer mit 3 Farbringen verwenden!



Wichtiger Hinweis: Bohrer für harten Knochen D1,
erkennen Sie an der Farbmarkierung = **3 rosa Ringe**



ICX-ACTIVE MASTER


ICX-ACTIVE MASTER

DAS BESONDERS
FÜR DEN OBERKIEFER
UND DIE SOFORT-
IMPLANTATION
ENTWICKELTE
ICX-IMPLANTAT.

Alle Längen →

Alle Durchmesser →

Das Implantat-Design von ICX-ACTIVE-MASTER wurde entwickelt, um die stetig steigenden Anforderungen von Chirurgen und Prothetikern zu erfüllen.

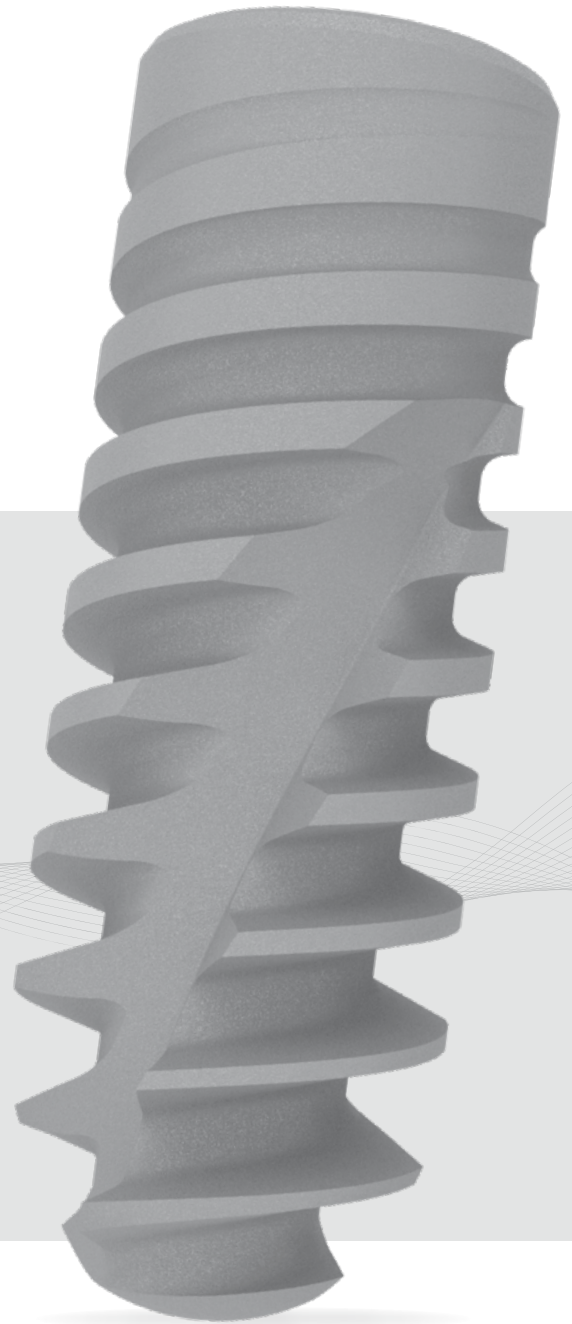

**WANN WECHSELN SIE ZU ICX –
DEM FAIREN PREMIUM-IMPLANTAT?**

BE SMART. BE ICX.

medentis
medical

BOHRPROTOKOLL 2.0

ICX-3.3 IMPLANTAT

BL & TL PREMIUM & ACTIVE MASTER



medentis medical GmbH

Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler · Tel.: +49 (0)2641 9110-0

www.medentis.de

mm02418

BE SMART. BE ICX.