

NEU ++ NEU!!

medentis
medical

59,€
je ICX-Implantat
Alle Linsen,
die Querschnitte
"ICX-Modell"



ICX-Produkt-Informationsblatt Seite 1

Schraubenöffnungen suchen bei ICX-Implantaten nach der Abformung – das muss nicht sein!

Die medentis medical GmbH hat zu ihren 2-teiligen, offenen Abformpfosten ein Hilfsteil beigelegt.



Schrauben Sie die ICX-Abformpfosten ein. Überprüfen Sie den guten Sitz des Individuellen Löffels, aus Ihrem Dentallabor.



Platzieren Sie nun, die von der medentis medical GmbH mitgelieferten Hilfsteile auf den Schrauben der 2-teiligen Abdruckpfosten.



Weiter auf der Rückseite!

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de

NEU ++ NEU!!

medentis
medical



ICX-Produkt-Informationsblatt Seite 2

Schraubenöffnungen suchen bei ICX-Implantaten nach der Abformung – das muss nicht sein!

Erstellen Sie jetzt die Abformung mit Ihrem gewohnten Abformmaterial.



Entfernen Sie die neuen ICX-Hilfsteile. Die Öffnungen der Abformpfosten-Schrauben sind jetzt frei zugänglich.



ICX-templant[®]

Das **FAIRE** Premium-Implantat.